

BOND FORCE



Lichthärtendes, selbstätzendes Ein-Komponenten Adhäsiv

- Applikation nur einer Bondingschicht
- Haftkraft wie bei Bondings der 6. Generation
- Haftet an beschliffenem und ungeschliffenem Schmelz und Dentin
- Weniger Fehlerquellen
- Geringe Filmschicht (8µm)
- Hohe Fluoridabgabe



Die Kombination
des Champions:
Herausragende
Haftkraft
bei simpler
Anwendung.

Vertrieb durch:



IHR PARTNER FÜR QUALITÄT

 **Tokuyama**
Creation with a heart

BOND FORCE: Einfache Anwendung und außergewöhnliche Haftkraft

Ein Meilenstein in der Entwicklung der Adhäsivsysteme: Innovatives Einkomponenten-Adhäsiv, das trotz einfachster Anwendung mit herausragenden adhäsiven Eigenschaften überzeugt, eine geringe Filmschicht aufweist und über einen ausgezeichneten Randschluss verfügt.



Geringe Filmschicht



Optimaler Randschluss



Applikation
20 SEK.

Trocknung
10 SEK.

Aushärtung
10 SEK.

Bond Force applizieren

Einmassieren an der Grenzlinie

Sanfte, indirekte Lufttrocknung

Anschließend stark Lufttrocknen

Licht härten

Sichere Anwendung

BOND FORCE reduziert Fehlerquellen, da jegliche Vorbehandlungen, wie beispielsweise der Mischvorgang, vollständig entfallen. Ätzen, Primern oder Bonden ist nicht mehr erforderlich. Einfach vollständig in nur einer Schicht auf die Kavitätswände auftragen und der Haftvermittler ist bereit zur Weiterverarbeitung.

Einfache Anwendung


BOND FORCE als ein selbstätzendes, lichthärtendes und fluoridfreisetzendes Adhäsiv besitzt hervorragende physikalische Eigenschaften. Nach der Applikation ist lediglich eine Trocknungsphase von 10 Sekunden nötig, bevor mit der Aushärtung begonnen werden kann.

Optimales Ergebnis

BOND FORCE mit seiner exzellenten Haftkraft und hohen Fluoridabgabe garantiert bei minimalem Aufwand ein optimales Ergebnis. Besonders seine hervorragende marginale Versiegelung an unbeschleunigtem Schmelz verbessert ästhetische Restaurationen.

Einzigartig mit 3D-SR Technologie

Die innovative selbst-strukturstärkende (3D self-reinforced) Technologie des BOND FORCE ermöglicht einzigartige Haftkräfte.

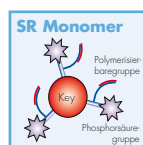

Die außergewöhnliche Adhäsionskraft basiert auf besonderen chemischen Eigenschaften, die auf der selbst-strukturstärkenden Technologie von TOKUYAMA beruhen. Bereits vor der Lichthärtung bilden zahlreiche Phosphorgruppen Verbindungen zum Apatit der Zahnoberfläche und den Kalziumionen der Zahnschicht. Die durch diese Reaktion entstehende gelartige Adhäsivschicht ist weniger empfindlich hinsichtlich der Lufttrocknung. Durch die mannigfaltigen chemischen Bindungen der Polymerisationsgruppen wird nach der Lichthärtung eine widerstandsfähige und reißfeste Adhäsivschicht garantiert.



BOND FORCE je Anwendung **0,38 €**

5 ml sind ausreichend für 280 Applikationen

Komplettpackung: 1 x 5 ml Flasche, 50 Mikropinsel, Anmischschale 104,95 €

Unit Dose Packing: 50 x 0,1 ml Bond Force, 50 Mikropinsel 119,95 €

Die Lieferung erfolgt porto- und versandkostenfrei.


Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

Vertrieb durch:

KANIEDENTA GmbH & Co. KG - Dentalmedizinische Erzeugnisse · Zum Haberland 36 · D-32051 Herford · Postfach 20 22 · D-32010 Herford
Telefon 05221 - 34550 · Fax 05221 - 345511 · E-Mail: info@kaniedenta.de · Internet: www.kaniedenta.de

Labortests bestätigen das außergewöhnliche Randschlussverhalten:

RANDSCHLUSSVERHALTEN

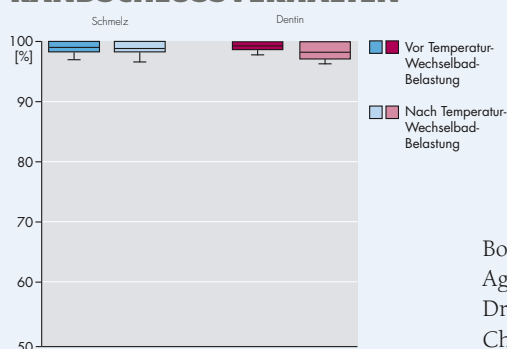

Bondforce mit Agitation Dr. Blunck, Charité Berlin

Unabhängige Studien belegen die qualitativ hochwertigen Eigenschaften des Adhäsivsystems **BOND FORCE**.

Zitat: „Die hohe Wirksamkeit des in dieser In-Vitro Studie in Klasse V Füllungen getesteten Adhäsivsystems, **BOND FORCE**, kann an den hohen Werten für die Randqualität „kontinuierlicher Rand“ von 95% und höher abgelesen werden.“

BOND FORCE – ein Adhäsiv auf das Sie sich verlassen können – eben typisch TOKUYAMA.

Studie kann beim Hersteller und Vertreter eingesehen werden.