



# Tokuyama

*Creation with a heart*



Vertrieb durch:



IHR PARTNER FÜR QUALITÄT

# Estelite Flow quick

Ultraschnelles Sub-Mikrofüller-Komposit  
Hervorragende physikalische Eigenschaften  
Perfekte Ästhetik

Die optimale Vorbereitung

## ONE-UP BOND F plus

Das selbstätzende  
Einschritt-Adhäsiv mit  
visueller Unterstützung.  
Die perfekte Ergän-  
zung zu **ESTELITE**.



## Extrem schnelle Polymerisation

**ESTELITE FLOW QUICK** ist die neueste Entwicklung aus dem Hause TOKUYAMA. Aufgrund der äußerst kurzen Polymerisationszeit – bei gleichzeitig garantierter


Tiefenhärtung – wird die Behandlungsdauer wesentlich verkürzt. Ihre Patienten werden es Ihnen danken.

Polymerisationszeit

**Halogen: 10 Sek.**

**LED: 10 Sek.**

**Xenon: 3 Sek.**

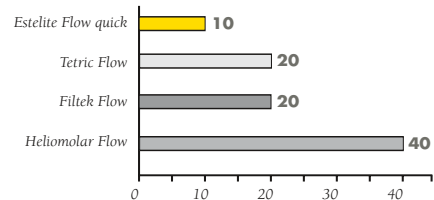

## RAP-Technologie

Die neue, von Tokuyama patentierte **RAP-TECHNOLOGIE** (Radical Amplified Polymerisation Initiator) ist weltweit einzigartig. Und so einfach funktioniert die **RAP-TECHNOLOGIE**:

Die Lichtenergie der Polymerisationslampe regt das Campherchinon an. Das Campherchinon-Molekül gibt die Energie direkt an die RAP-Initiatoren weiter. Diese erzeugen dann viele freie Radikale, die das Monomer extrem

schnell aushärten. **ESTELITE FLOW QUICK** enthält deutlich weniger Campherchinon als konventionelle Composites. Wegen der hohen Anzahl der gebildeten freien Radikale kann der Anteil an Campherchinon minimiert werden.

So bleibt **ESTELITE FLOW QUICK** unter Umgebungslicht stabil und härtet nicht vorzeitig aus – das Composite kann ohne Zeitdruck exakt platziert werden.

## Ästhetik wie in der Natur

**ESTELITE FLOW QUICK** besitzt dank seiner innovativen Füllstoff-Technologie eine vollkommen natürliche Ästhetik.

Die runden **ESTELITE FLOW QUICK** Sub-Mikropartikel garantieren eine hervorragende Polierbarkeit und einen ausgezeichneten Oberflächenglanz.

Die optimale Fließeigenschaft erlaubt einen präzisen Einsatz sowohl bei Frontzahn-Restorationen als auch im molaren Bereich.

Kleiner Aufwand – große Wirkung: **ESTELITE FLOW QUICK**. So individuell wie Ihre Patienten.


## Der wirklich signifikante Chamäleon-Effekt

Jeder Mensch ist einzigartig. So wie seine Zähne und deren Farbe.

Dank seiner intelligenten Formel trifft **ESTELITE FLOW QUICK** immer genau die richtige Zahnfarbe. Mit nur 4 Grundfarben wird das gesamte Farbspektrum optimal abgedeckt.

## ESTELITE FLOW QUICK:


So natürlich wie sein Vorbild.

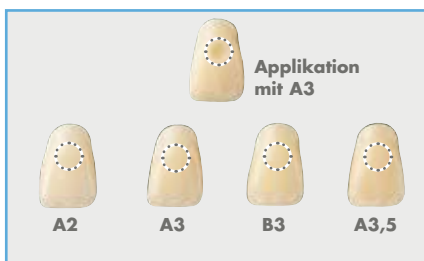


Vita	Hell												Dunkel			
	Inc	B1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A <sub>3,5</sub>	B4	C3	A4	C4
Estelite																
A1					●											
A2					●											
A3									●							
A3,5												●				

## Sub-Mikrofüller mit kugelförmigen Füllstoffen


Die gezielte Kombination von kugelförmigen Füllstoffen (0,4 µm und 0,07 µm) garantiert eine dem Zahnschmelz ähnliche Glätte. Somit wird eine ausgezeichnete Polierbarkeit und einzigartige Ästhetik garantiert.

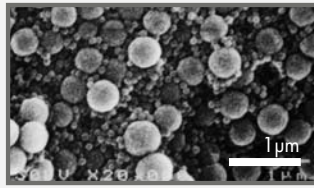


**ESTELITE FLOW QUICK**  
im Vergleich mit anderen  
Füllstoffen.

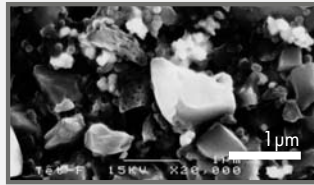

Tetric Flow

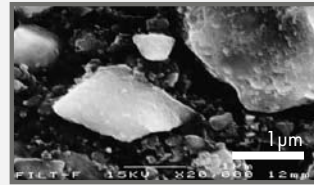





Filtek Flow

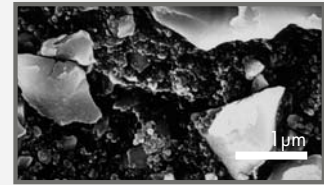

Grandio Flow

## Hervorragende physikalische Eigenschaften

Composites im wissenschaftlichen Vergleich, durchgeführt von Prof. de Gee, Academic Center of Dentistry Amsterdam (ACTA). Dieser Vergleichstest bestätigt die hervorragenden physikalischen Eigenschaften, begründet durch den hohen Füllstoffanteil von 71% (nach Gewicht) und 53% (nach Volumen). Ein fließfähiges Komposit so gut wie eine universelle Paste.

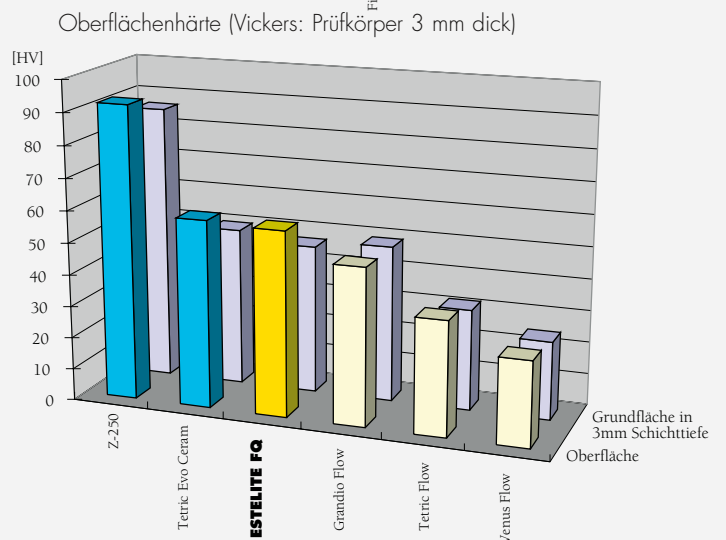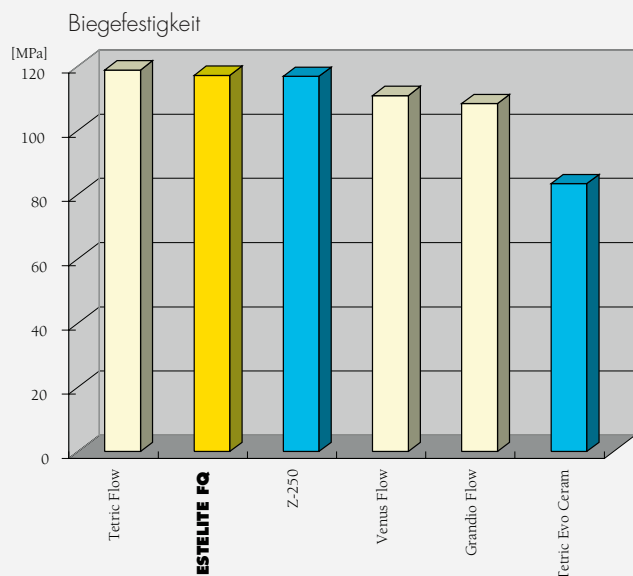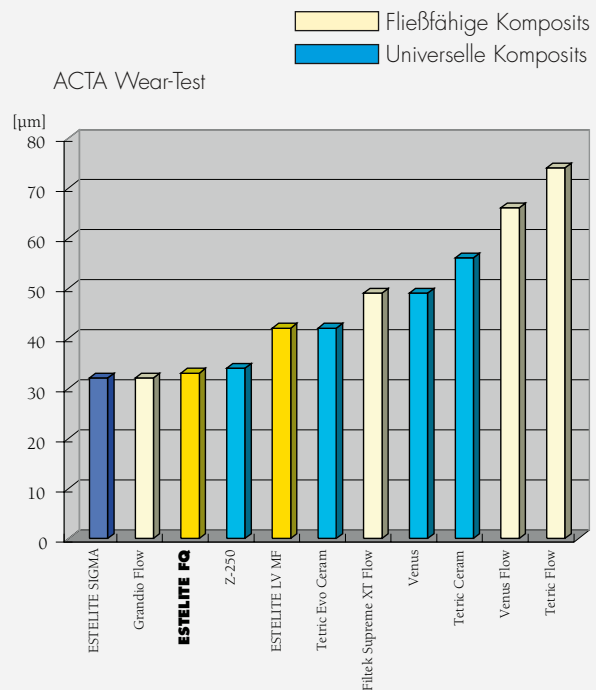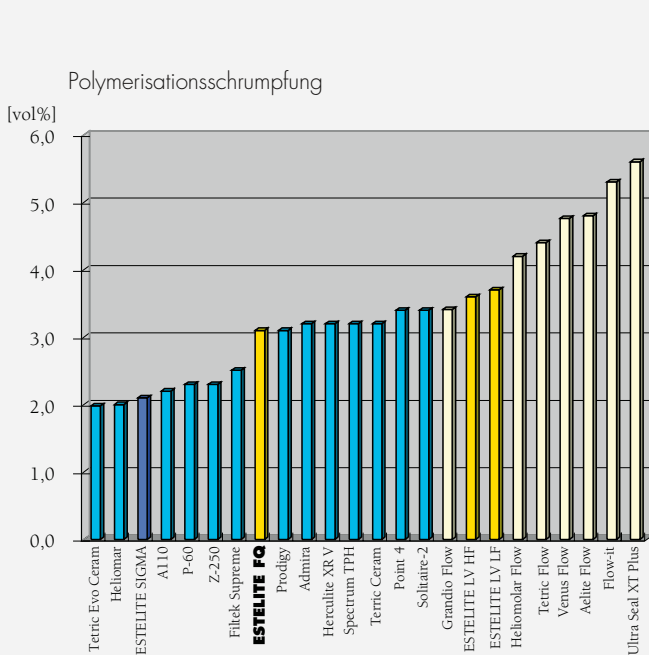

## ESTELITE FLOW QUICK



### ESTELITE FLOW QUICK Einzelspritze à 1,8g

Zum individuellen Arbeiten gibt es  
**ESTELITE FLOW QUICK** in 17 Vitafarben:  
 A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3,  
 OA1, OA2, OA3, Inzisal, Zervikal und Bleaching.

#### Innovation bis ins kleinste Detail

Die neu entwickelte Applikations-  
 spitze verhindert Nachtropfen.  
 So können Sie exakt arbeiten,  
 ohne unnötiges Material zu  
 verbrauchen.



#### Die optimale Ergänzung:

## ESTELITE SIGMA



### ESTELITE SIGMA Drehspritze à 3,8g Dosierkapseln à 0,2g

#### Eine echte Perle unter den Kompositen

- Natürliche Ästhetik
- Breiter Farbanpassungsbereich
- Minimale Farbänderung nach der Polymerisation
- Geringe Schrumpfung

## ESTELITE LV HIGHflow MEDIUMflow LOWflow



### ESTELITE LV HIGHflow MEDIUMflow LOWflow Einzelspritze à 3g

#### Für jede Indikation die richtige Konsistenz

- Einfache Anwendung
- Hervorragende Ästhetik
- Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften



IHR PARTNER FÜR QUALITÄT

Vertrieb durch:

KANIEDENTA GmbH & Co. KG - Dentalmedizinische Erzeugnisse · Zum Haberland 36 · D-32051 Herford · Postfach 20 22 · D-32010 Herford  
 Telefon 05221 - 34550 · Fax 05221 - 345511 · E-Mail: [info@kaniedenta.de](mailto:info@kaniedenta.de) · Internet: [www.kaniedenta.de](http://www.kaniedenta.de)