

# ONE-UP BOND F PLUS



## Das lighthärtende Haftmittel mit visueller Unterstützung.

- Fehlerminimierung durch sichtbare Kontrolle.
- Einfache Applikation und Aufbewahrung in der Quick'n Easy Box.
- Deutlich kürzere Behandlungszeit durch einfache Anwendung.
- Sicherheit durch einzigartige zuverlässige Haftkraft.
- Bis zu 300 Anwendungen.

## ONE-UP BOND F PLUS:

- Minimaler Aufwand – optimales Resultat.



Einfacher, schneller  
und sicherer –  
das Bonding der  
*plus* Generation



## Die Quick'n Easy Box

Ein echter Fortschritt für die komfortable Anwendung: In der neuen Quick'n Easy Box sind beide Komponenten gut aufbewahrt, sofort verfügbar und kipp sicher abgestellt. Die Hände kommen nicht mit der Chemikalie in Kontakt.



**A+B Bonding**

**5 SEK.**  
Mischen



**mindestens 10 SEK.**  
Auftragen und einmassieren\*



**10 SEK.**  
Belichten

### Einfache Anwendung

**ONE-UP BOND F PLUS** spart kostbare Zeit – Ihre Zeit und die Ihrer Patienten. Denn die Arbeitsschritte Ätzen, Spülen und Trocknen entfallen vollständig. Einfach Bonding A+B mischen. Auftragen, einmassieren und belichten. Fertig.

### Sichtbare Kontrolle

**ONE-UP BOND F PLUS** minimiert technische Fehler. Farbwechsel bestätigen jeden Behandlungsschritt gut sichtbar. Es hebt sich von der freien Zahnfläche deutlich ab. So können Sie die Ergebnisse sofort kontrollieren und korrigieren. Überhänge mit Haftmittel werden vermieden.

### Zuverlässige Haftung

**ONE-UP BOND F PLUS** garantiert bei minimalem Aufwand ein optimales Ergebnis – in mindestens 25 Sekunden. Sicher, einfach und schnell. Mit besonders starker Haftkraft. **ONE-UP BOND F PLUS** vereint alle Kriterien, die im Praxisalltag zählen.

\* Bitte bei größeren Kavitäten entsprechend länger einmassieren. Z.B. mindestens 15 Sekunden wenn die Kavität größer als der Pinselkopf ist.

## Innovativ in der Anwendung – verbessert in der Haftkraft

**Ein einfacher Behandlungsschritt sorgt für höhere Haftkraft und ideale Haltbarkeit – in kürzester Zeit.**

Neu am Bonding der PLUS-Generation: Direkt nach dem Auftragen massieren Sie es mit Applitipps einige Sekunden lang ein. Dadurch dringt das Monomer tief in die Zahnschmelz, demineralisiert diese und geht eine feste Verbindung mit dem Zahn ein.

Auftragungsmethode	Zugfestigkeit Mpa (S.D.)
<b>Einmassieren</b> (10 Sekunden)	Zahnschmelz: 20.7 (5.8) Dentin: 24.2 (4.2)
<b>Einwirkenlassen</b> nach dem Auftragen (20 Sekunden)	Zahnschmelz: 21.0 (3.8) Dentin: 18.3 (3.9)

**ONE-UP BOND F PLUS** je Anwendung **0,53 €**

5ml sind ausreichend für mindestens 280 Anwendungen


Setpreis 2 x 5ml, Quick'n Easy Box, Anmischschale, 50 Applitipps inkl. Halter 148,50 €

Die Komponenten des Sets sind auch einzeln erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

## Hervorragende Eigenschaften – von Wissenschaftlern bestätigt

### VERGLEICH DER SCHER-HAFTKRAFT

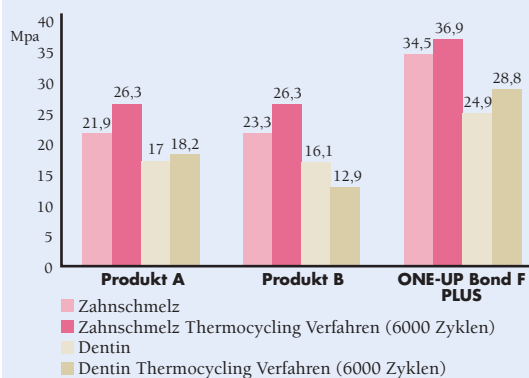

Auszug aus der Studie von Prof. Dr. Schmalz, Universität Regensburg, 2004

Renommierte Wissenschaftler haben **ONE-UP BOND F PLUS** unter härtesten Praxisbedingungen getestet und die hervorragenden Produkteigenschaften uneingeschränkt bestätigt. Geprüft und für sehr gut befunden. Ein Produkt, auf das Sie sich verlassen können. Eben typisch Tokuyama.

Als Polymerisationslampe eignet sich eine Halogenlampe (10 Sek.), Plasmalampe (6 Sek.) oder LED-Lampe (10 Sek.). Bitte testen Sie vor der ersten Anwendung die ideale Polymerisationsdauer Ihrer UV-Lampe extraoral.